

MODE D'EMPLOI

Test à réaliser en quelques minutes

Ce test est recommandé pour les personnes de 50 à 74 ans.
Consultez votre médecin et ne faites pas le test si :

- vous avez des antécédents personnels ou familiaux de polype, de cancer ou de maladie du côlon,
- vous avez des douleurs abdominales ou des troubles digestifs inhabituels et persistants, ou en cas de présence de sang dans les selles.

CE KIT DE DÉPISTAGE COMPREND 3 VOLETS

- 1 TOUTES LES INDICATIONS
POUR BIEN RÉALISER VOTRE TEST
- 2 LA FICHE D'IDENTIFICATION À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
ET LE PAPIER DE RECUEIL DES SELLES
- 3 LE TUBE DE PRÉLÈVEMENT
LE SACHET DE PROTECTION DU KIT
ET L'ENVELOPPE T DE RETOUR DU TEST

Volet 1

IMPORTANT mode d'emploi

Il est recommandé de poster le test en semaine, le samedi matin ou le dimanche soir (et jamais la veille d'un jour férié) et de le réaliser dans les 24 heures qui précèdent.

Ce kit est à usage personnel. Avant son utilisation, conservez-le à une température comprise entre 2 et 30 degrés au maximum.

Pour consulter ce mode d'emploi en vidéo,
flashez ce code ou connectez-vous sur
e-cancer.fr/tutoriel-test-depistage-cancer-colorectal





PROGRAMME NATIONAL
DE DÉPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL

F

MERCI D

IMPORTANT

Inst
(Cet
Vot
(Augu

Collez ici

la grande étiquette
figurant sur votre lettre d'invite

Si vous n'avez pas cette étiquette

- Indiquez votre adresse _____
- Remplissez aussi la partie ci-d

Partie à remplir unia

Norm de naissance : _____

Nom d'usage : _____

Volet 2

fiche d'identification +
dispositif de recueil des selles

Date de naissance :

Sexe : Femme Homme

N° de Sécurité
(Numéro d'identité)

N° de Voie

Nom
Prénoms
N° de Sécurité
Date

Merci

Adresse

Code postal

N° de téléphone

N° d'assurance maladie ou d'établissement

Pour un médecin exerçant en centre de santé

Conformément à la loi n° 78-17 du 6.01.78 CNIL, vous avez le droit en nous contactant par courrier. Le médecin coordonnateur



VOIR LES INDICATIONS AU DOS

Volet 3

tube de prélèvement +
sachet de protection +
enveloppe de retour

